



Operačné stredisko záchranné zdravotnej služby Slovenskej republiky

Trnavská cesta 8/A 820 05 | Bratislava 25 | P.O. BOX 93

Prehľad AED na Slovensku






Obsah

Amoul i3, i5	- 3 -
Aselsan Heartline	- 4 -
BeneHeart C1	- 5 -
BeneHeart C2	- 6 -
BeneHeart D1	- 7 -
CardioAid	- 8 -
CardioAid-1	- 9 -
Corpuls AED	- 10 -
DefiSign Life	- 11 -
Defibtech Lifeline	- 12 -
HeartSine Samaritan PAD 350P semi, 450P semi, 500P semi, PDU 400 emi, PAD 360P fully	- 13 -
IPAD CU-SP1	- 15 -
IPAD NF 1200	- 16 -
Lifepak 1000	- 17 -
Lifepak CR Plus	- 18 -
Lifepak CR2	- 19 -
LifePoint Pro	- 20 -
Mediana A 15 HeartOn AED	- 21 -
ME PAD	- 22 -
Philips HeartStart	- 23 -
Philips HeartStart FR2+	- 24 -
PowerHeart G3	- 25 -
PowerHeart G5	- 26 -
Primedica	- 27 -
Reanibex 100	- 28 -
Rescue SAM	- 29 -
Rescue Sam 4	- 30 -
Saver One	- 31 -
Smarty Saver	- 32 -



Schiller Fred Easy	- 33 -
Schiller Fred Easy – s prepnutím na lekársky režim	- 34 -
Schiller Fred PA 1	- 35 -
Telefunken	- 36 -
Weinmann Meducore Easy	- 37 -
Welch Allyn	- 38 -
Zoll AED Plus	- 39 -
Zoll AED 3	- 40 -

Amoul i3, i5

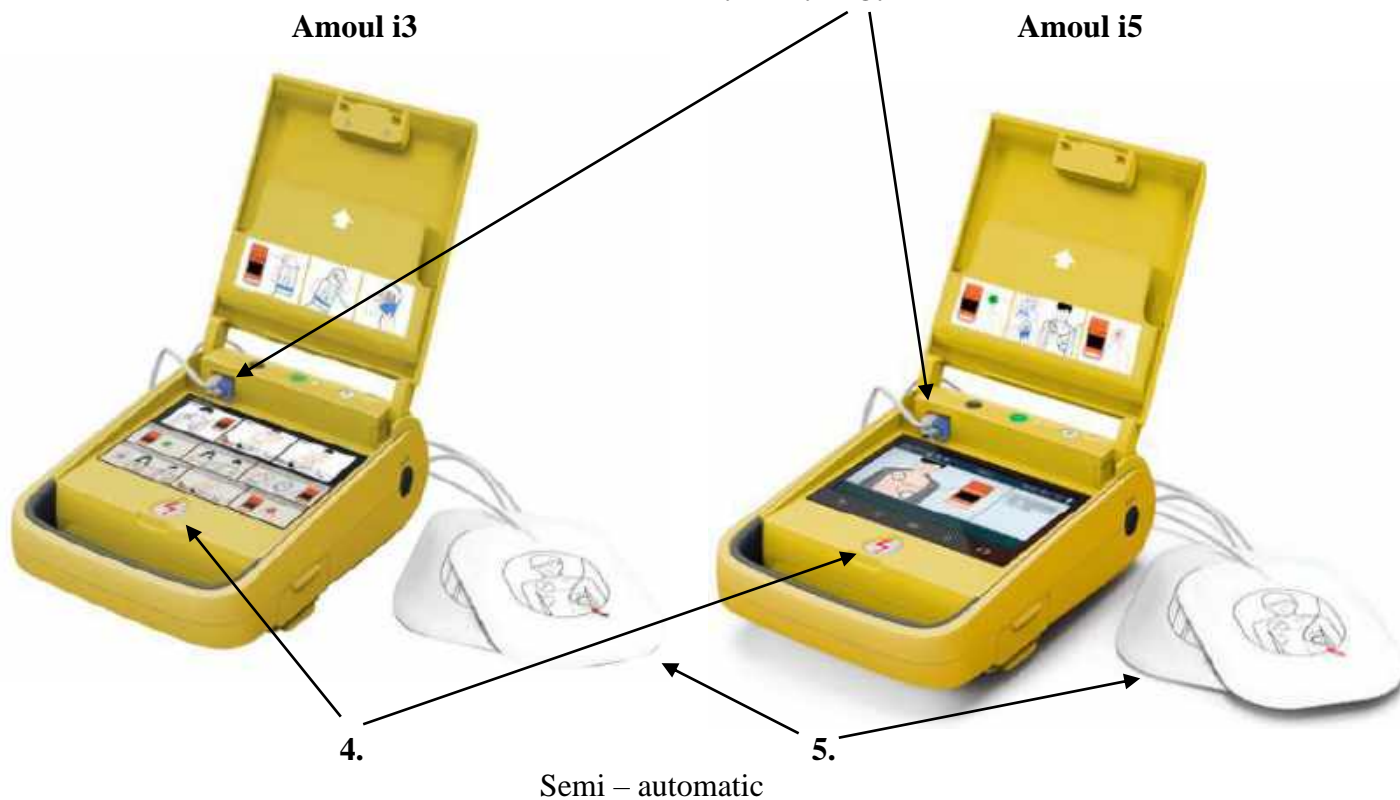

Legenda:

1. Zelené tlačidlo na zapnutie/vypnutie prístroja.
2. Potiahnutím otvor veko.
3. Pripojenie elektród
4. Tlačidlo na podanie výboja
5. Defibrilačné elektródy

Aselsan Heartline



Púzdro na zips

Fully – automatic

Semi - automatic



Legenda:


1. Zelené tlačidlo zapnutie/vypnutie prístroja
2. Červené tlačidlo na podanie výboja
3. Kontrolná dióda pripojenia detských elektród. Prístroj rozpozná pripojenie detských elektród a automaticky sa prepne do detského režimu.
4. Pripojenie defibrilačných elektród
5. Uloženie defibrilačných elektród

BeneHeart C1



1. 2. 3.

5.

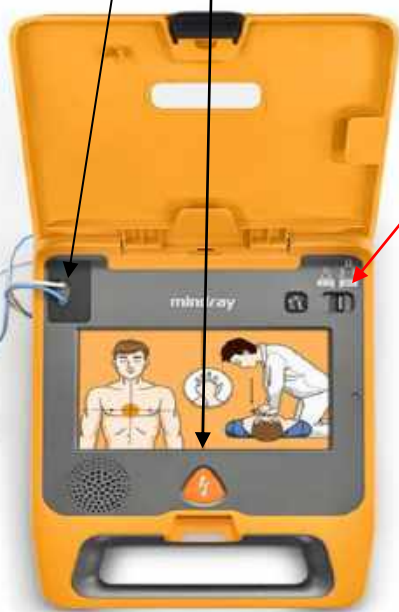

Semi – automatic

Fully - automatic

4.

Legenda:


1. Potiahni a otvor veko, prístroj sa automaticky zapne
2. Pripojenie elektród
3. Tlačidlo na podanie výboja
4. Defibrilačné elektródy (na elektródach znázornené pred zadné uloženie pri detskom pacientovi)
5. Prepínanie pre detský a dospelý režim - prístroj má univerzálne elektródy, pre KPR detí prepni na režim dieťa <8r alebo < 25kg

Tlačidlo detský režim



Pediatric mode

BeneHeart C2

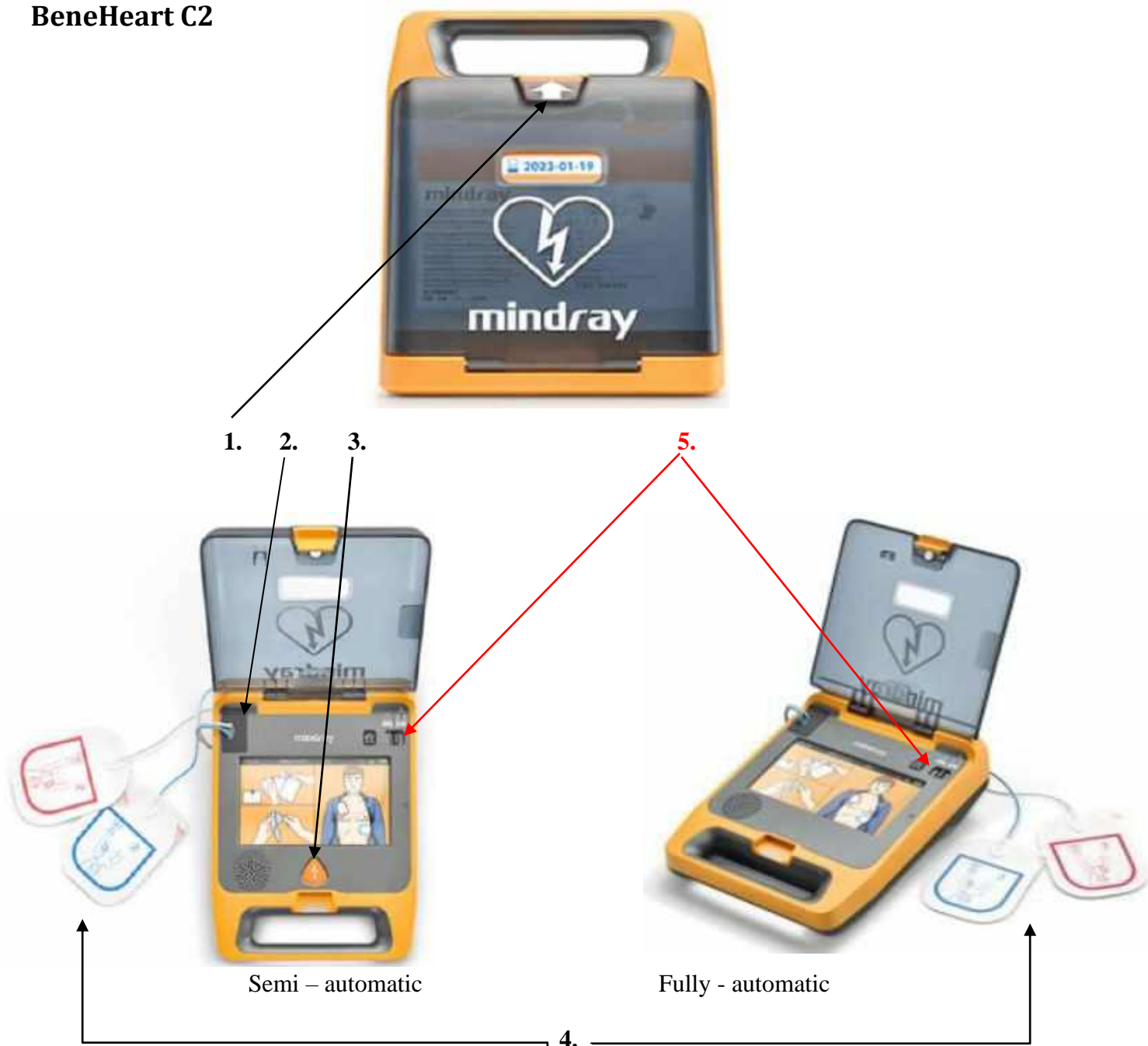

Legenda:

1. Potiahni a otvor veko, prístroj sa automaticky zapne
2. Pripojenie elektród
3. Tlačidlo na podanie výboja
4. Defibrilačné elektródy (na elektródach znázornené predtým) uložené pri detskom pacientovi
5. Prepínanie pre detský a dospelý režim - prístroj má univerzálne elektródy, pre KPR detí prepni na režim dieťa <8r alebo <25kg

Tlačidlo detský režim



Pediatric mode

BeneHeart D1



1. 2. 3.

4.



5.

Semi – automatic

Legenda:


1. Zelené tlačidlo zapnutie/vypnutie prístroja
2. Tlačidlo pre detský a dospelý režim (prístroj má univerzálne elektródy, pre KPR detí prepni na režim dieťa <8r alebo < 25kg)
3. Červené tlačidlo na podanie výboja
4. Defibrilačné elektródy
5. Pripojenie defibrilačných elektród

Tlačidlo detský režim



Pediatric mode


CardioAid

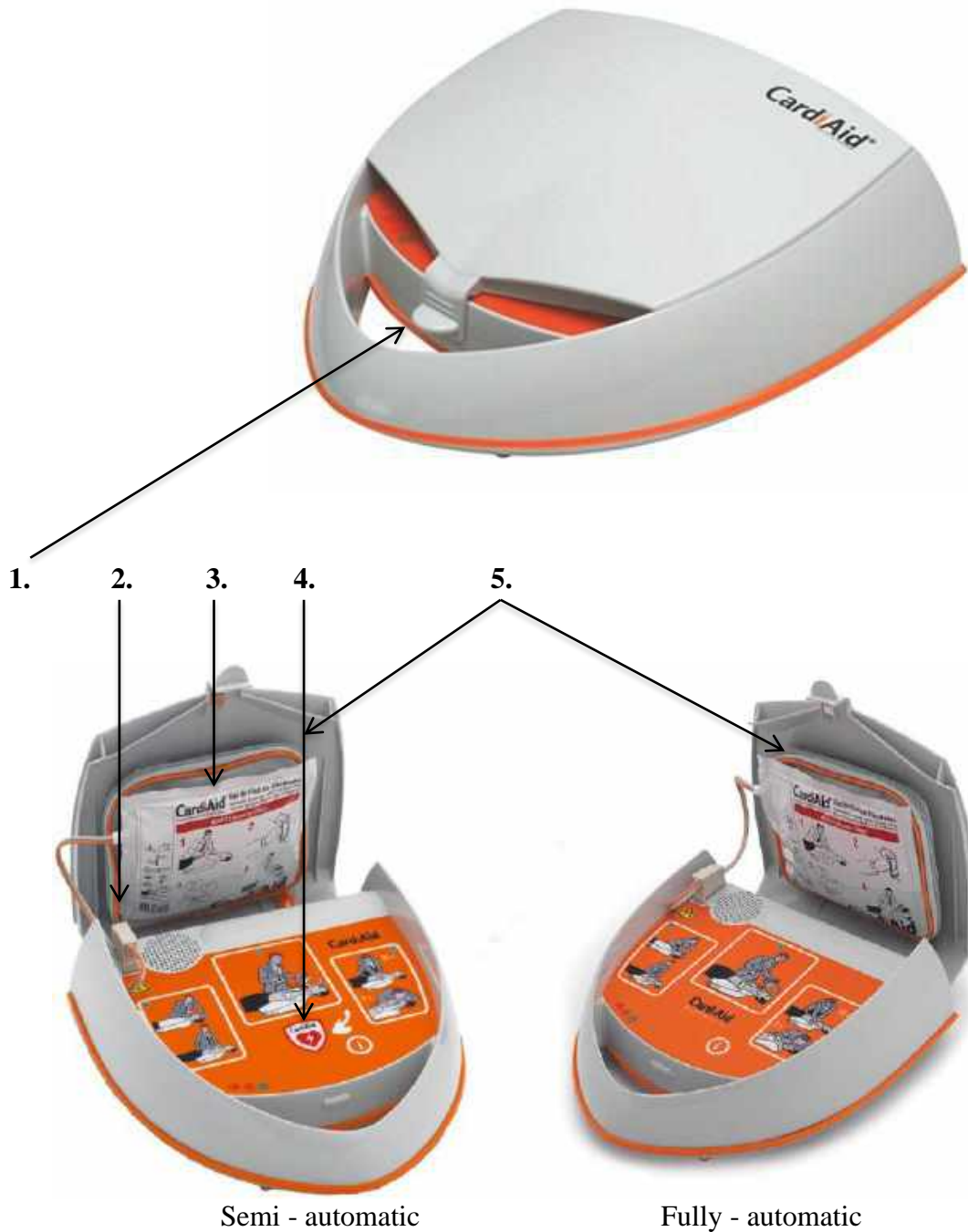

Legenda:

1. Potiahni a otvor veko, prístroj sa automaticky zapne
2. Pripojenie defibrilačných elektród
3. Defibrilačné elektródy
4. Červené tlačidlo na podanie výboja pre typ semi-automatic
5. Brašna s obsahom: resuscitačná maska, holiaci strojček, nožnice, rukavice, dezinfekcia

CardioAid-1

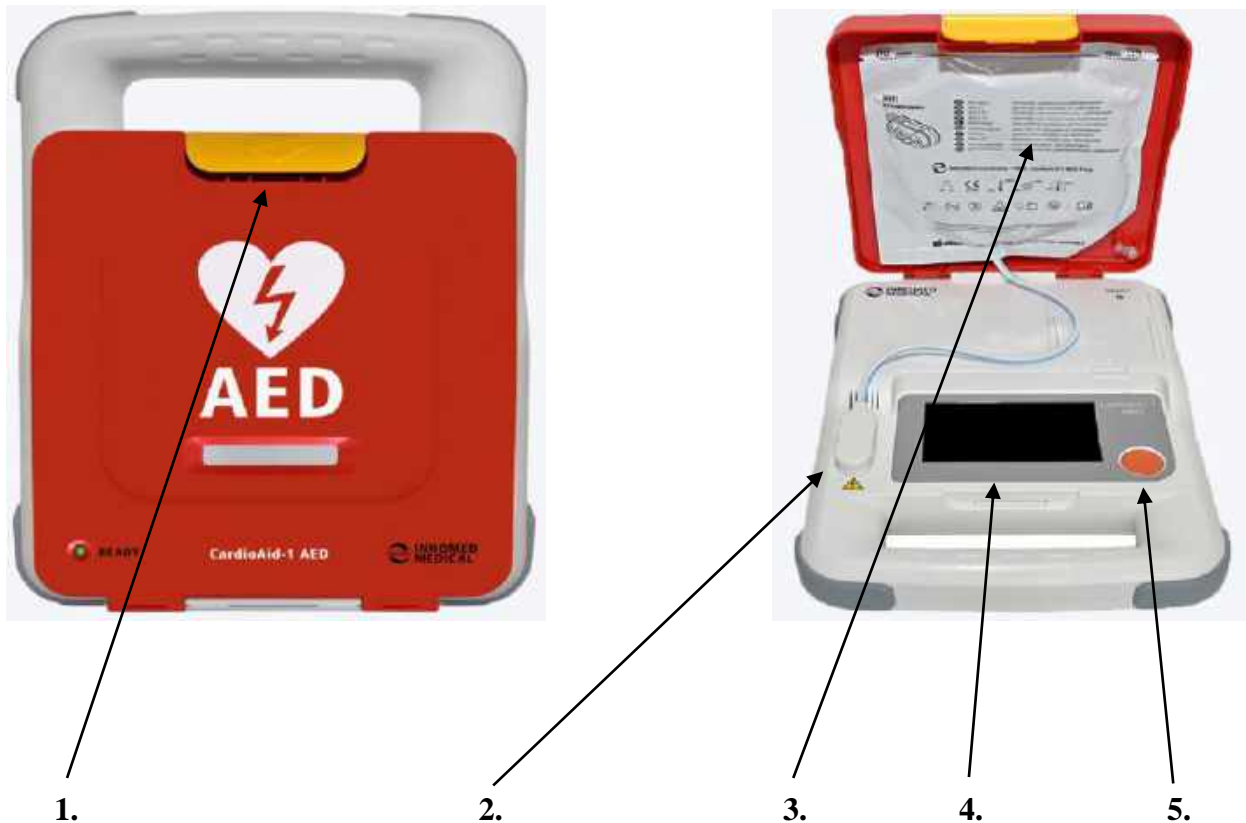

Semi – automatic

Legenda:

1. Zatlač v smere šípky a prístroj sa otvorí. Po zdvihnutí veka sa automaticky zapne.
2. Pripojenie defibrilačných elektród
3. Defibrilačné elektródy
4. Display
5. Tlačidlo na podanie výboja

Corpuls AED



Semi – automatic

Fully - automatic



4. 5.

Legenda:

1. Zelené tlačidlo on/off
2. Červené tlačidlo na podanie výboja pre typ semi -automatic
3. SOS tlačidlo – tiesňové volanie
4. Pripojenie CPR senzora, meria hĺbku, rýchlosť a zobrazuje na displeji
5. Pripojenie elektród

DefiSign Life



Semi - automatic

Legenda:

1. Potiahni a otvor veko, prístroj sa automaticky zapne
2. Pripojenie elektród
3. Defibrilačné elektródy
4. Červené tlačidlo na podanie výboja pre typ semi -automatic
5. Tlačidlo zmeny jazykovej mutácie

Defibtech Lifeline



Semi – automatic

Fully – automatic




Legenda:

1. Zelené tlačidlo on/off
2. Červené tlačidlo na podanie výboja
3. Pripojenie defibrilačných elektród
4. Uloženie defibrilačných elektród

HeartSine Samaritan PAD 350P semi, 450P semi, 500P semi, PDU 400 emi, PAD 360P fully



Výmena sady defibrilačných elektród pre modely HeartSine okrem PDU 400.
HeartSine PDU 400 detskú sadu nemá!

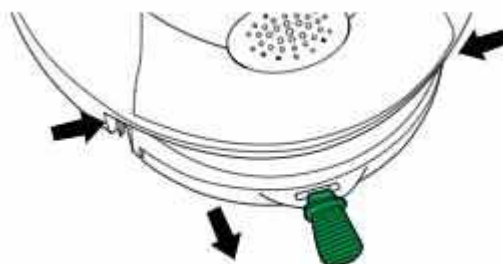

Zatlačiť prstami poistku po oboch stranách a potiahnuť !



Legenda:

1. Zelené tlačidlo on/off
2. Červené tlačidlo na podanie výboja
3. Potiahnutím vytiahni defibrilačné elektródy
4. Defibrilačné elektródy, štandardne má prístroj dospelý. Ak sú pri prístroji detské treba vymeniť celú kapsľu.

IPAD CU-SP1



Brašňa na zips



Semi – automatic



Fully - automatic

Legenda:


1. Tlačidlá pre detský a dospelý režim (prístroj má univerzálne elektródy, pre KPR detí prepni na režim dieťa <8r alebo <25kg)
2. Pripojenie defibrilačných elektród
3. Defibrilačné elektródy sú uchytené na zadnej strane prístroja
4. Oranžové tlačidlo na podanie výboja pri semi - automatic
5. Zelené tlačidlo on/off

Tlačidlo detský režim



Pediatric mode

IPAD NF 1200

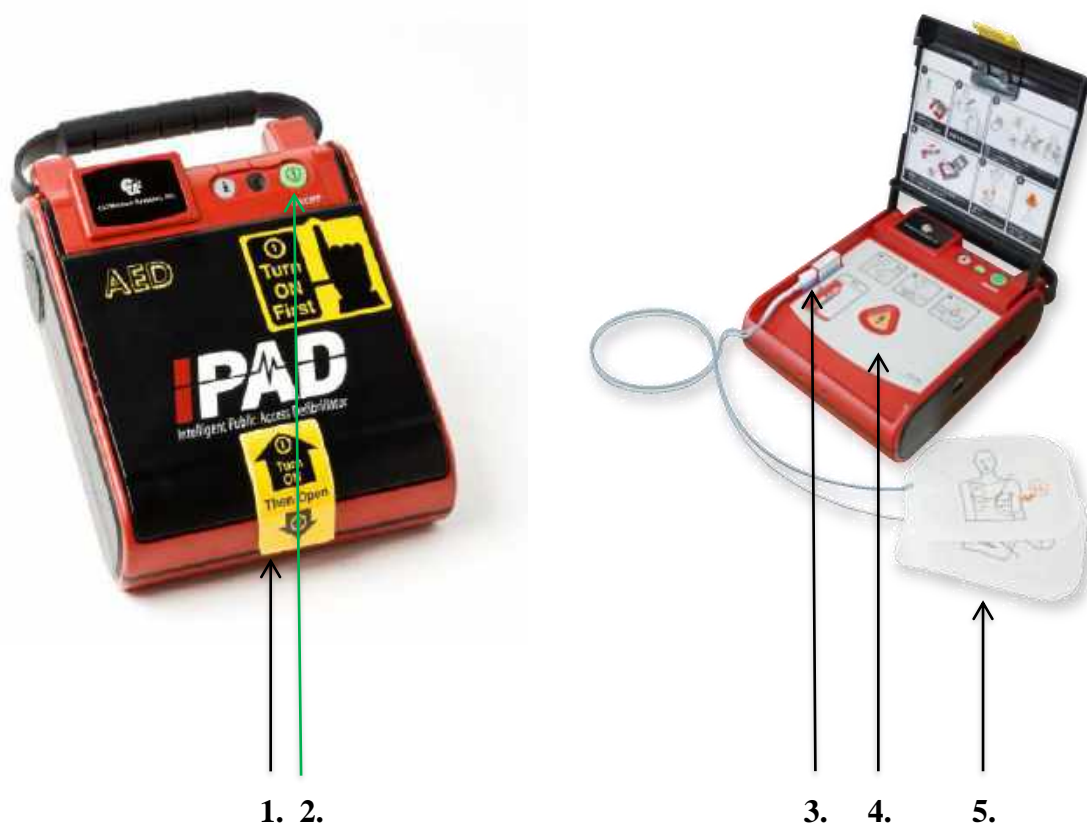


Semi - automatic

Legenda:

1. Potiahnutím otvor veko prístroja
2. Zelené tlačidlo on/off
3. Pripojenie defibrilačných elektród
4. Červené tlačidlo na podanie výboja
5. Defibrilačné elektródy

Lifepak 1000

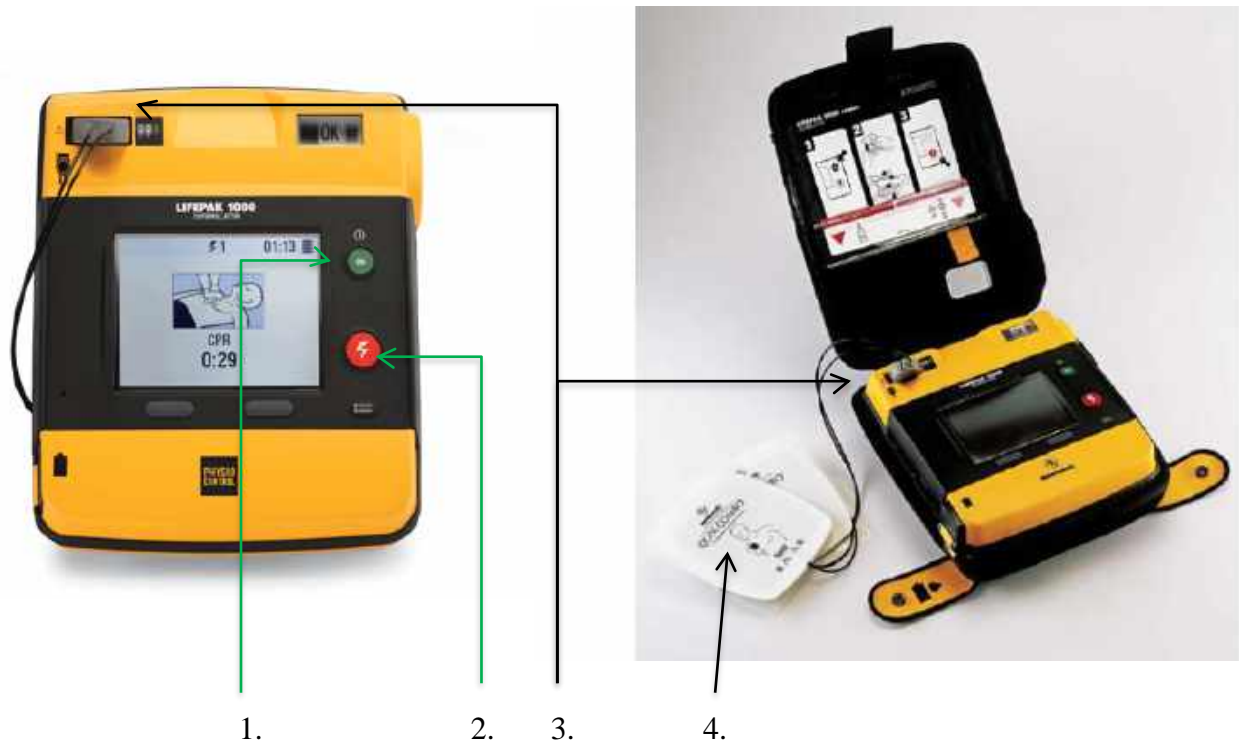


Semi - automatic

Legenda:

1. Zelené tlačidlo zapnutie/vypnutie prístroja
2. Červené tlačidlo na podanie výboja
3. Pripojenie defibrilačných elektród
4. Defibrilačné elektródy


Lifepak CR Plus

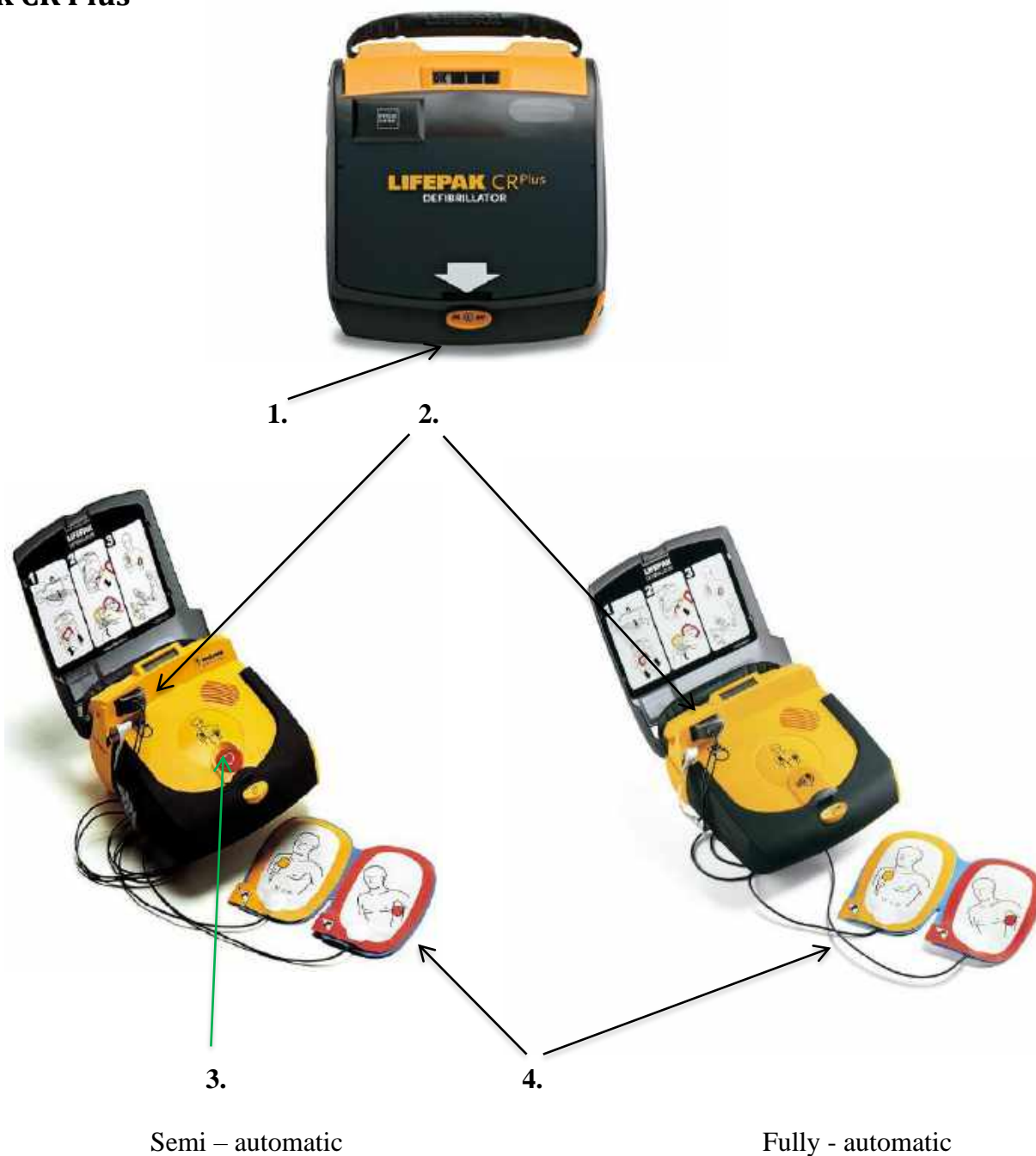

Legenda:

1. Stlačením tlačidla on/off sa veko otvorí a prístroj automaticky zapne
2. Pripojenie defibrilačných elektród
3. Tlačidlo na podanie výboja pre typ semi-automatic
4. Defibrilačné elektródy

Lifepak CR2

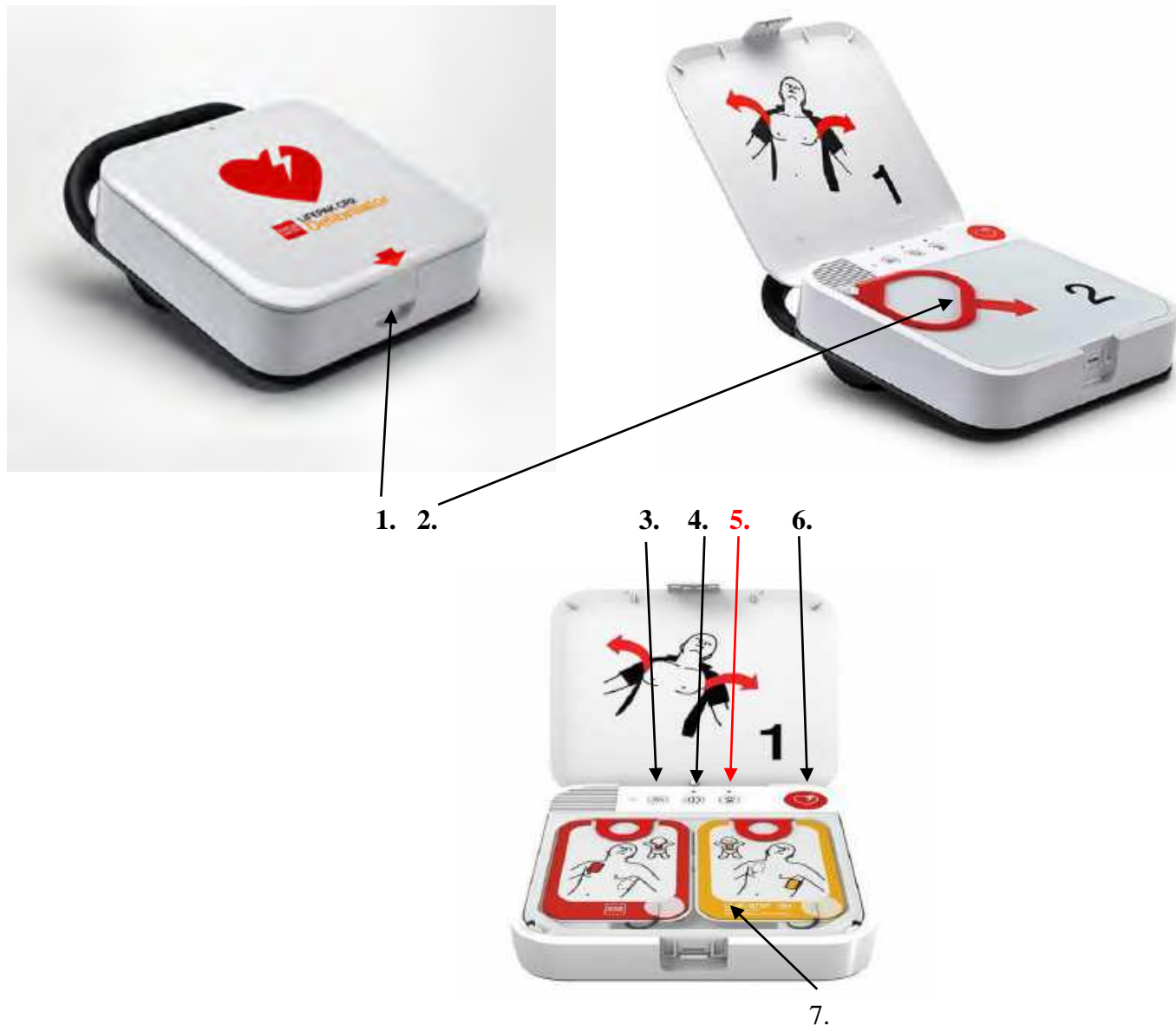

Semi – automatic

Legenda

1. Otvorenie prístroja
2. Potiahni za červenú rukoväť a rozbalíš elektródy
3. Tlačidlo prepnutie jazyka je nefunkčné.
4. Tlačidlo zapnutie/vypnutie prístroja
5. Tlačidlo detský režim (prístroj má univerzálne elektródy, pre KPR detí prepni na režim dieťa <8r alebo < 25kg)
6. Červené tlačidlo na podanie výboja
7. Defibrilačné elektródy

Poznámka: Prístroj, ktorý umožňuje kompresie aj počas analýzy.

Tlačidlo detský režim



Pediatric mode

LifePoint Pro




Semi - automatic

Legenda:

1. Pripojenie defibrilačných elektród
2. Defibrilačné elektródy
3. Zelené tlačidlo zapnutie/vypnutie prístroja
4. Rozsvieti sa kontrolka – nedotýkaj sa pacienta analyzujem
5. Červené tlačidlo na podanie výboja

Mediana A 15 HeartOn AED

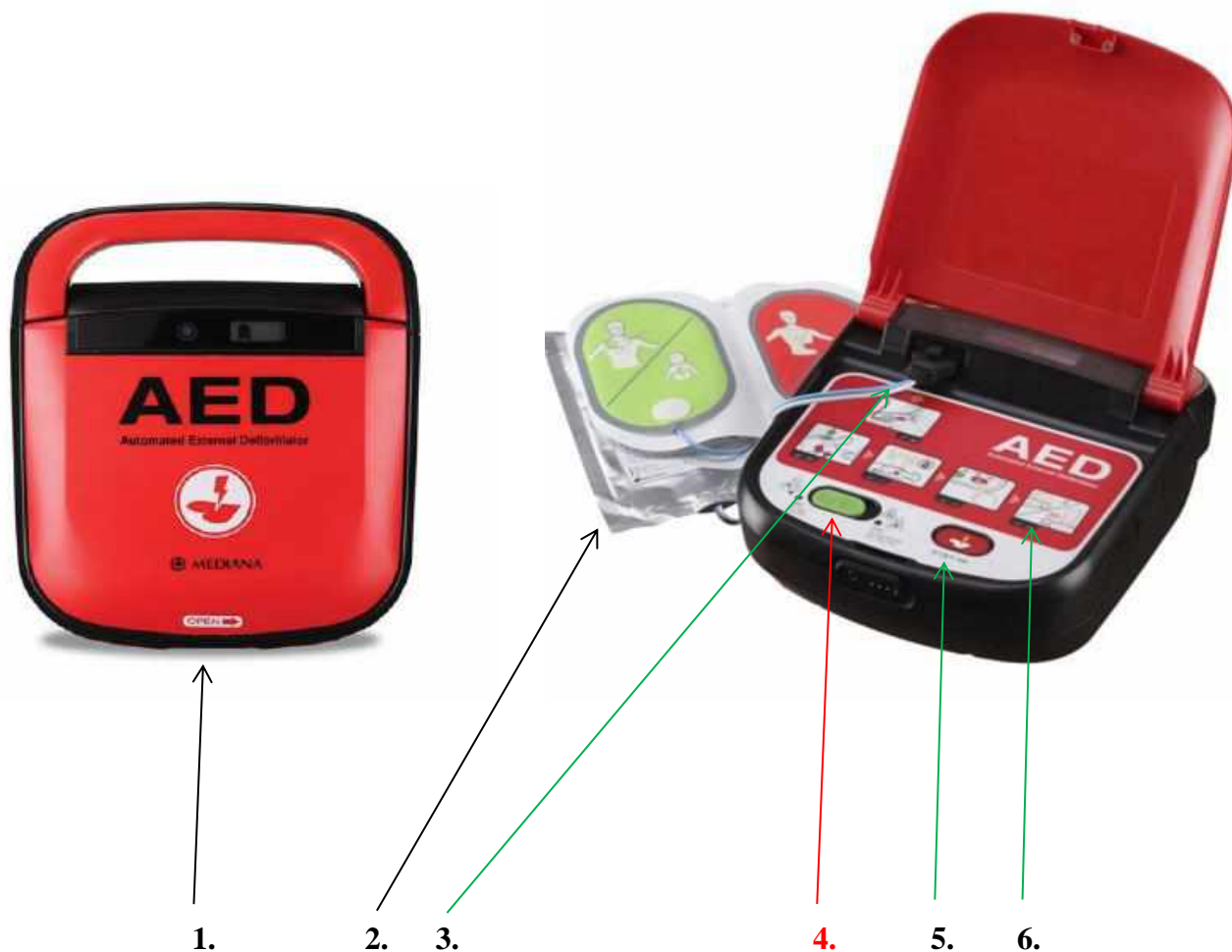

Semi - automatic

Legenda:

1. Potiahnutím doprava sa otvorí veko prístroja
2. Defibrilačné elektródy (univerzálne)
3. Pripojenie defibrilačných elektród
4. Tlačidlá pre detský a dospelý režim (prístroj má univerzálne elektródy, pre KPR detí prepni na režim dieťa <8r alebo < 25kg)
5. Červené tlačidlo na podanie výboja
6. Päť krokov navigácie AED

Tlačidlo detský režim



Pediatric mode


ME PAD



Brašňa na zips



3.

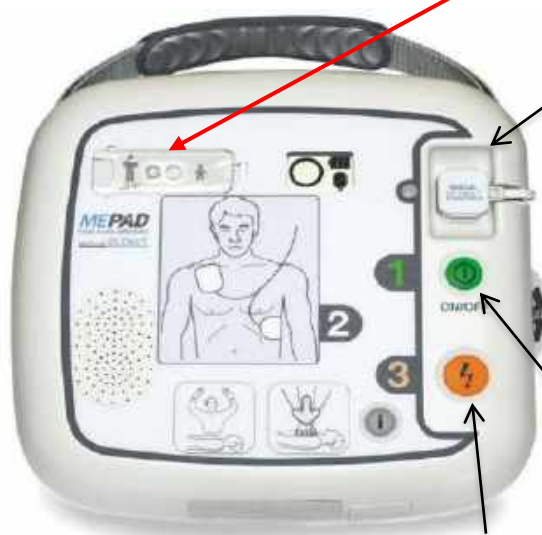

Semi – automatic



Fully - automatic

Legenda:

1. Tlačidlá pre detský a dospelý režim (prístroj má univerzálne elektródy, pre KPR detí prepni na režim dieťa <8r alebo < 25kg)
2. Pripojenie defubrilačných elektród
3. Defibrilačné elektródy sú uchytené na zadnej strane prístroja
4. Oranžové tlačidlo na podanie výboja pri semi - automatic
5. Zelené tlačidlo on/off

Tlačidlo detský režim



Pediatric mode

Philips HeartStart



Legenda:

1. Zelené tlačidlo on/off
2. Červené tlačidlo na podanie výboja
3. Indikátor nalepenie defibrilačných elektród
4. Pripojenie defibrilačných elektród
5. Defibrilačné elektródy
6. Detský kľúč- po zasunutí do otvoru sa AED prepne do detského režimu (nie je súčasťou balenia)



Tlačidlo detský režim



Pediatric mode

Philips HeartStart FR2+




Semi - automatic

Legenda:

1. Zelené tlačidlo on/off
2. Červené tlačidlo na podanie výboja
3. Defibrilačné elektródy
4. Pripojenie defibrilačných elektród

PowerHeart G3

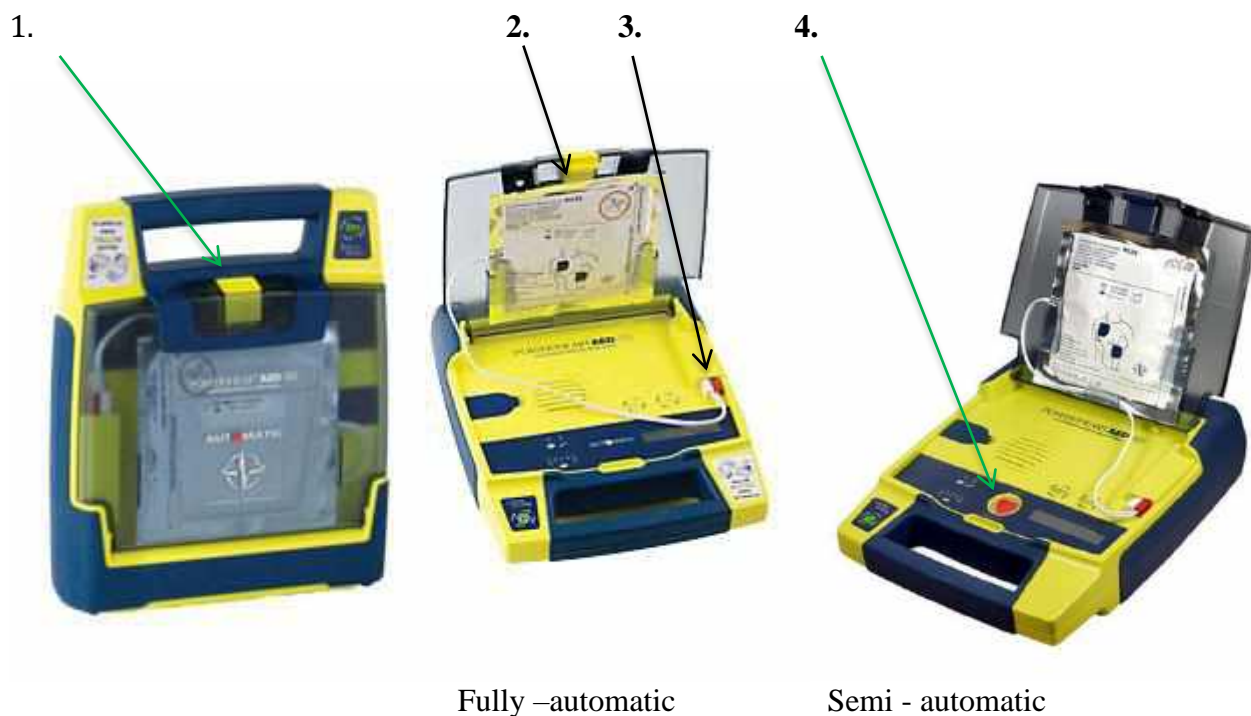

Legenda:

1. Stlač a potiahni veko, AED sa automaticky zapne
2. Defibrilačné elektródy
3. Pripojenie defibrilačných elektród
4. Tlačidlo na podanie výboja pre typ semi-automatic


PowerHeart G5



Legenda:

1. Potiahni a veko sa samo zdvihne , AED sa automaticky zapne
2. Defibrilačné elektródy
3. Pripojenie defibrilačných elektród
4. Tlačidlo na podanie výboja


Primedix

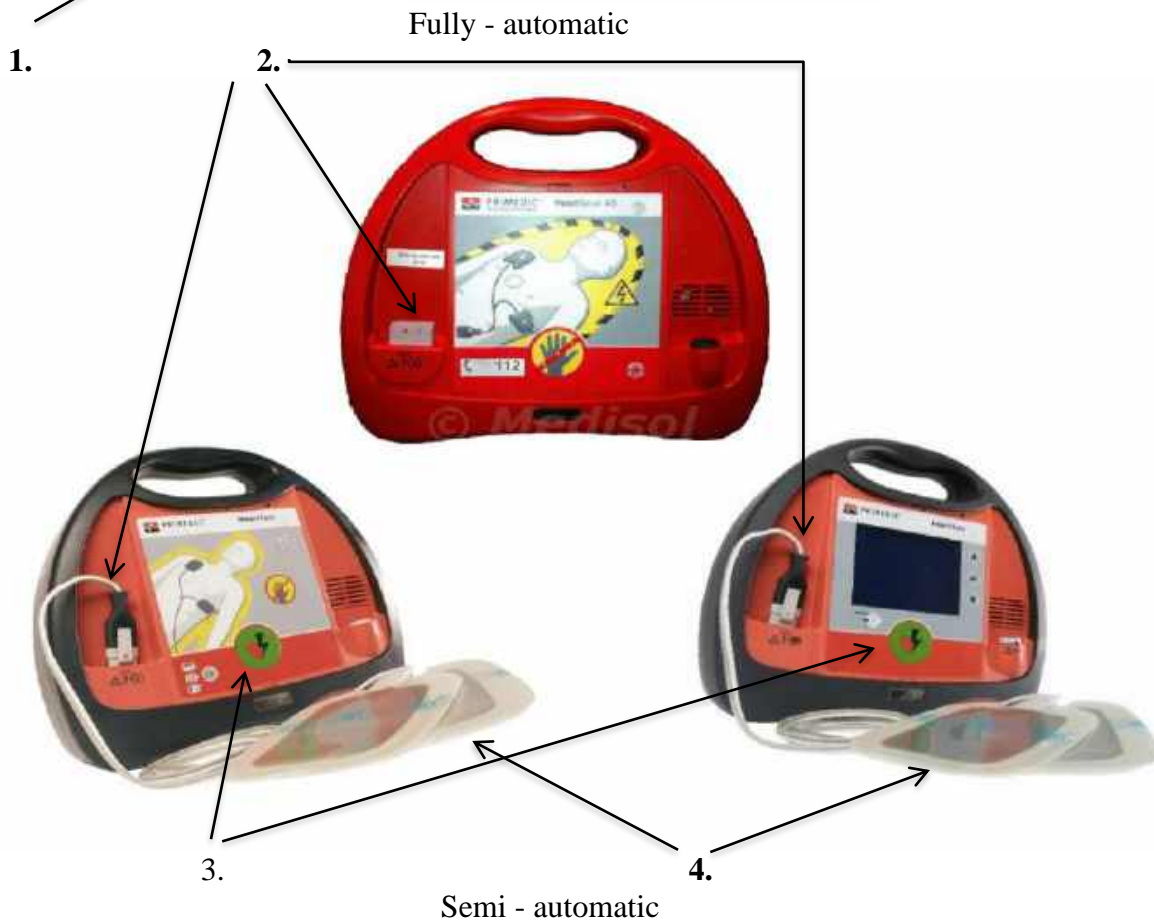

Legenda:

1. Potiahni a otvoríš veko, prístroj sa automaticky zapne
2. Pripojenie defibrilačných elektród
3. Tlačidlo na podanie výboja pre typ semi-automatic
4. Defibrilačné elektródy

Reanibex 100

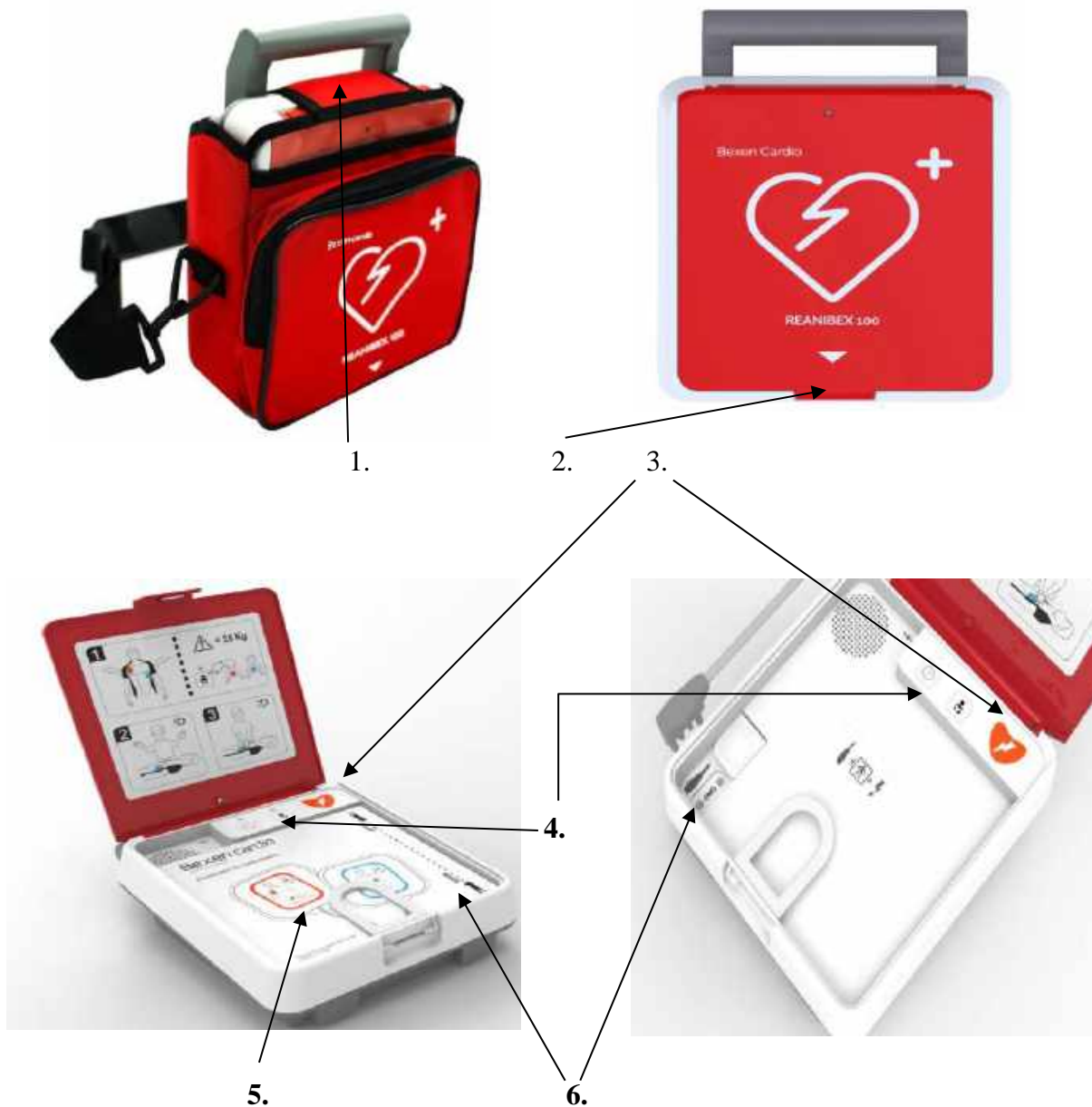

Legenda:

1. Odopni obal z vrchnej strany a vyber AED (Ak je AED v obale)
2. Potiahni a otvor veko na AED a AED sa automaticky zapne
3. Tlačidlo na podanie výboja (je tam vždy aj keď to je to fully – automatic ale je nefunkčné)
4. Prepínanie pre detský a dospelý režim - prístroj má univerzálne elektródy, pre KPR detí prepni na režim dieťa <8r alebo < 25kg
5. Defibrilačné elektródy (na elektródach znázornené predozadné uloženie pri detskom pacientovi)
6. Pripojenie defibrilačných elektród

Rescue SAM




Semi - automatic

Legenda:

1. Otváranie prístroja
2. Defibrilačné elektródy
3. Uloženie defibrilačných elektród
4. Zelené tlačidlo on/off
5. Červené tlačidlo na podanie výboj

Rescue Sam 4

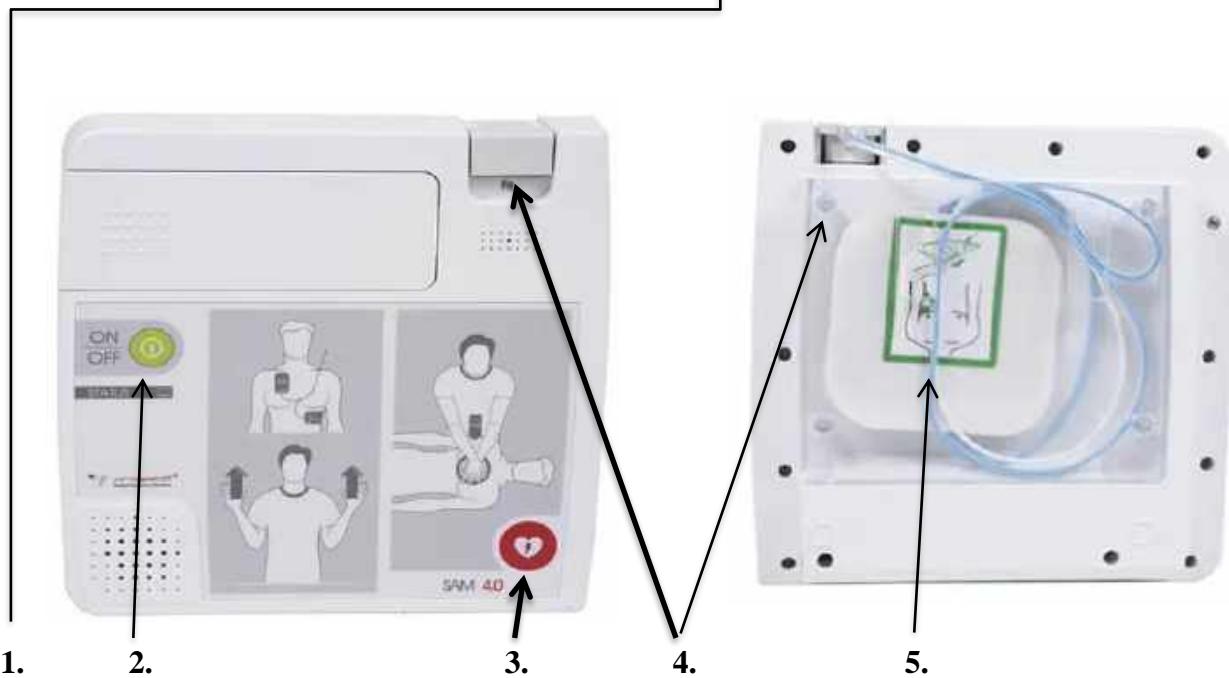


Semi - automatic

Legenda:

1. Otvorenie prístroja
2. Zelené tlačidlo on/off
3. Červené tlačidlo na podanie výboja
4. Zapojenie defibrilačných elektród
5. Uloženie defibrilačných elektród zo zadnej strany prístroja

Saver One

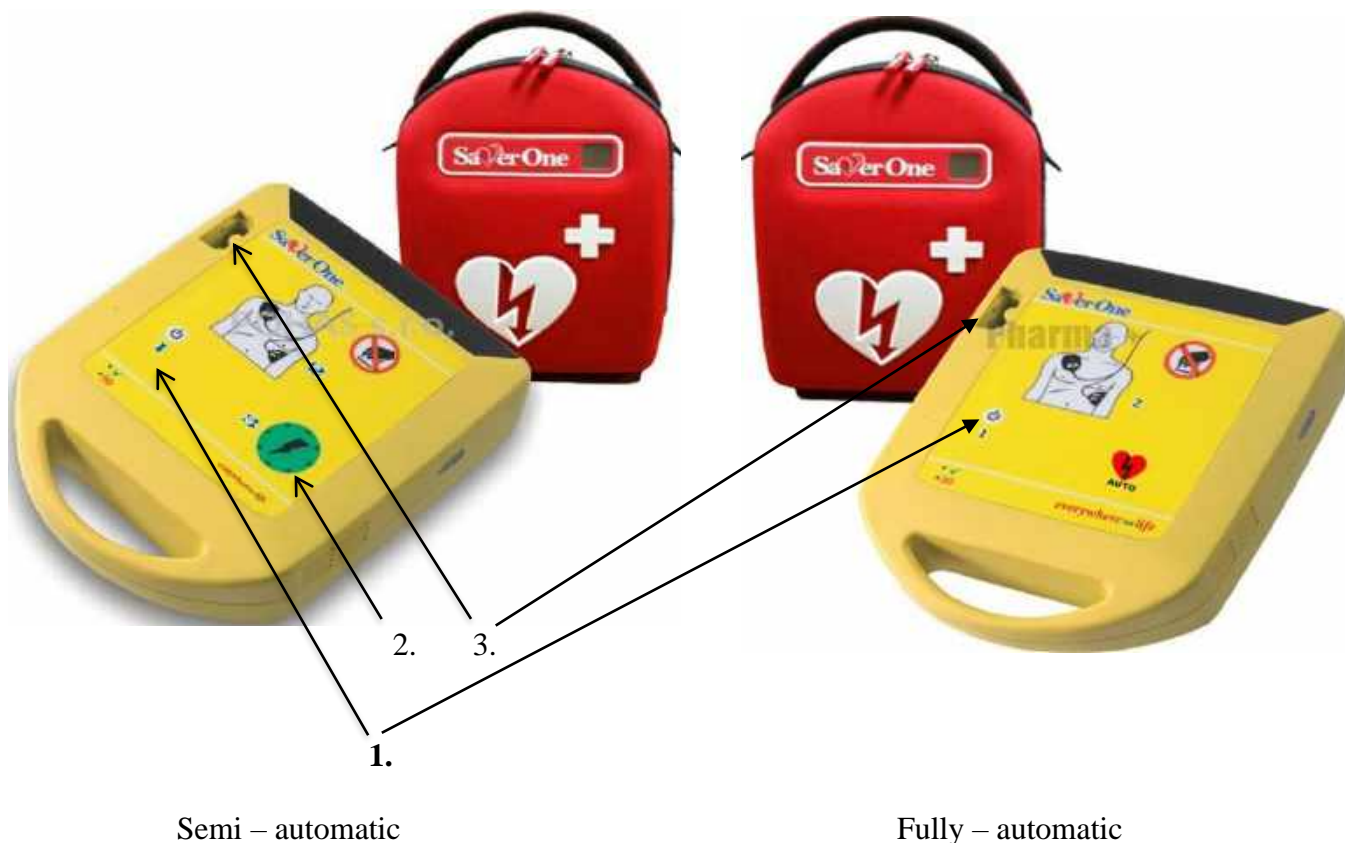

Legenda:

1. Tlačidlo zapnutie/vypnutie prístroja
2. Tlačidlo na podanie výboja pre typ semi – automatic
3. Pripojenie defibrilačných elektród

Smarty Saver



Semi - automatic



Legenda:


1. Zelené tlačidlo on/off
2. Pripojenie defibrilačných elektród
3. Tlačidlá pre detský a dospelý režim (prístroj má univerzálne elektródy, pre KPR detí prepni na režim dieťa <8r alebo < 25kg)
4. Tlačidlo na podanie výboja pre typ semi – automatic
5. Konektor defibrilačných elektród

Tlačidlo detský režim



Pediatric mode

Schiller Fred Easy

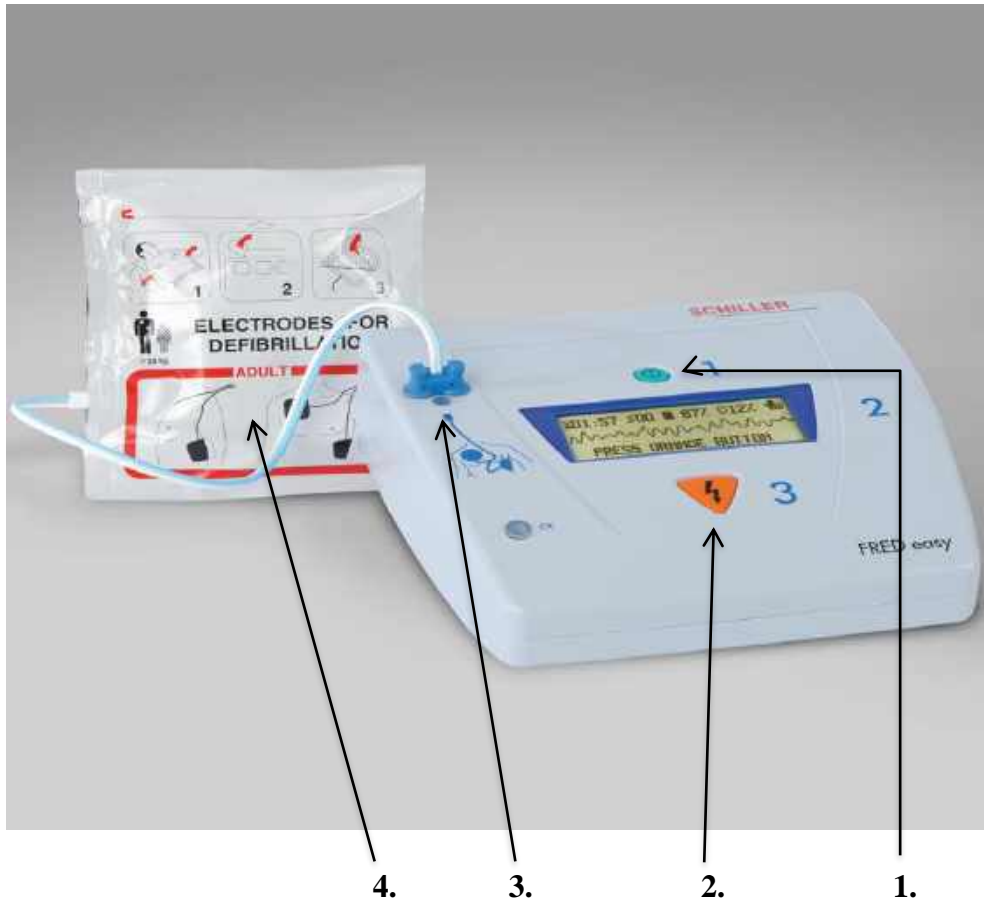


Semi - automatic

Legenda:

1. Zelené tlačidlo on/off
2. Červené tlačidlo na podanie výboja
3. Pripojenie defibrilačných elektród
4. Defibrilačné elektródy

Schiller Fred Easy – s prepnutím na lekárske režim

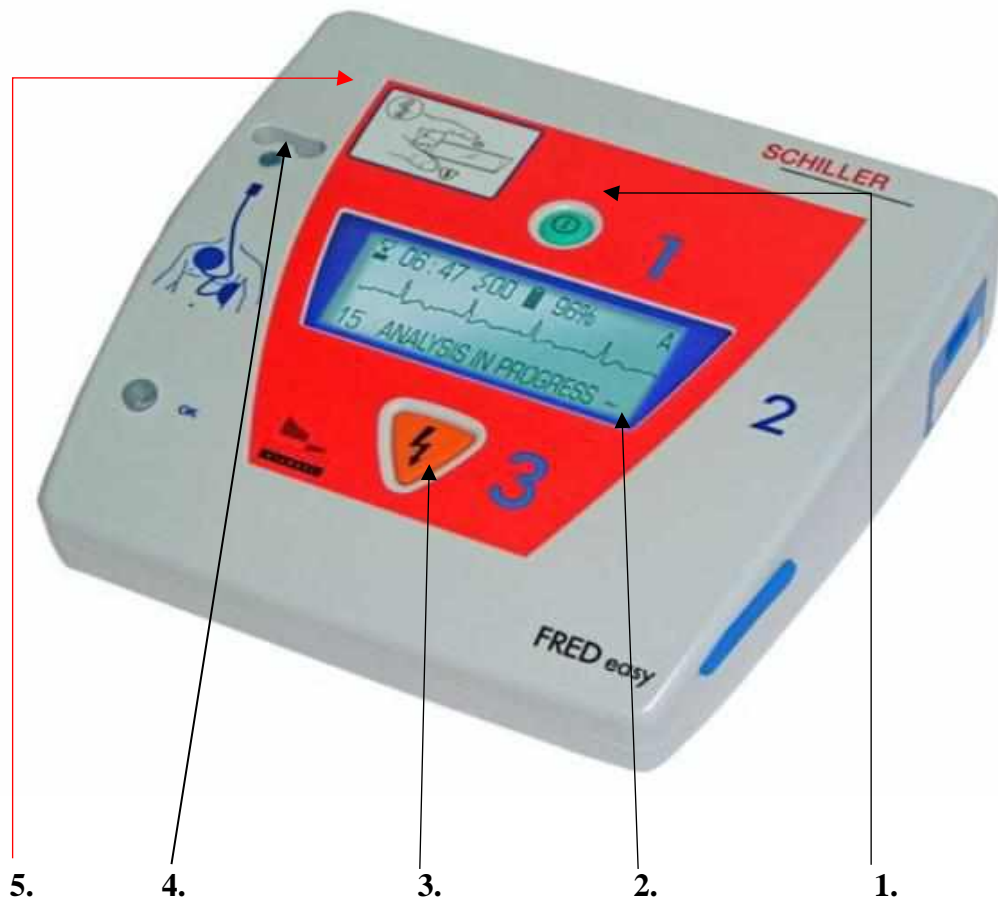


Semi - automatic

Legenda:

1. Zelené tlačidlo on/off
2. Display
3. Červené tlačidlo na podanie výboja
4. Pripojenie defibrilačných elektród
5. Piktogram zobrazujúci prepnutie na lekárske režim (manuálnu defibriláciu)


Schiller Fred PA 1

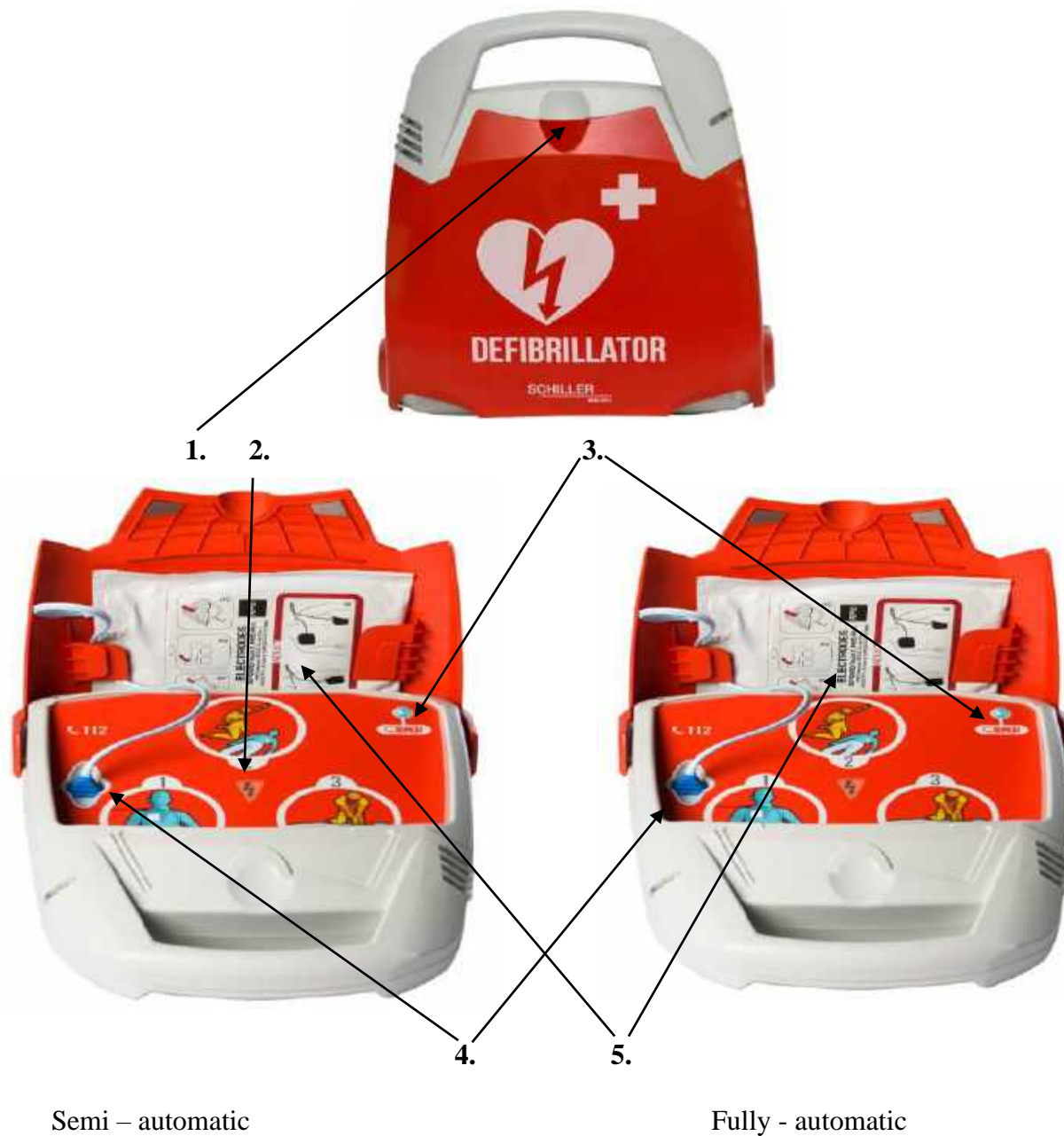

Legenda:

1. Potiahni a otvor veko, prístroj sa automaticky zapne
2. Tlačidlo na podanie výboja
3. Tlačidlo zmeny jazykovej mutácie
4. Pripojenie elektród
5. Defibrilačné elektródy

Telefunken

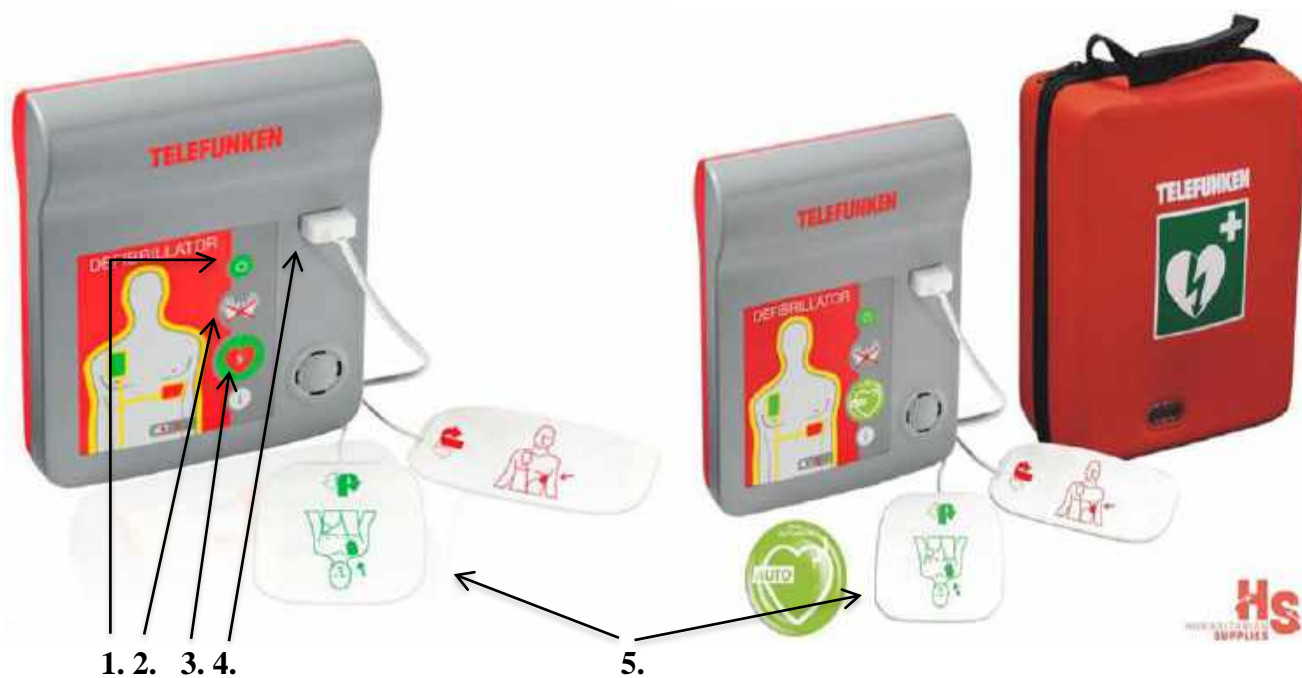


Semi – automatic

Fully - automatic

Legenda:

1. Zelené tlačidlo on/off
2. Indikátor-nedotýkať sa pacienta
3. Červené tlačidlo na podanie výboja
4. Pripojenie defibrilačných elektród
5. Defibrilačné elektródy

Weinmann Meducore Easy

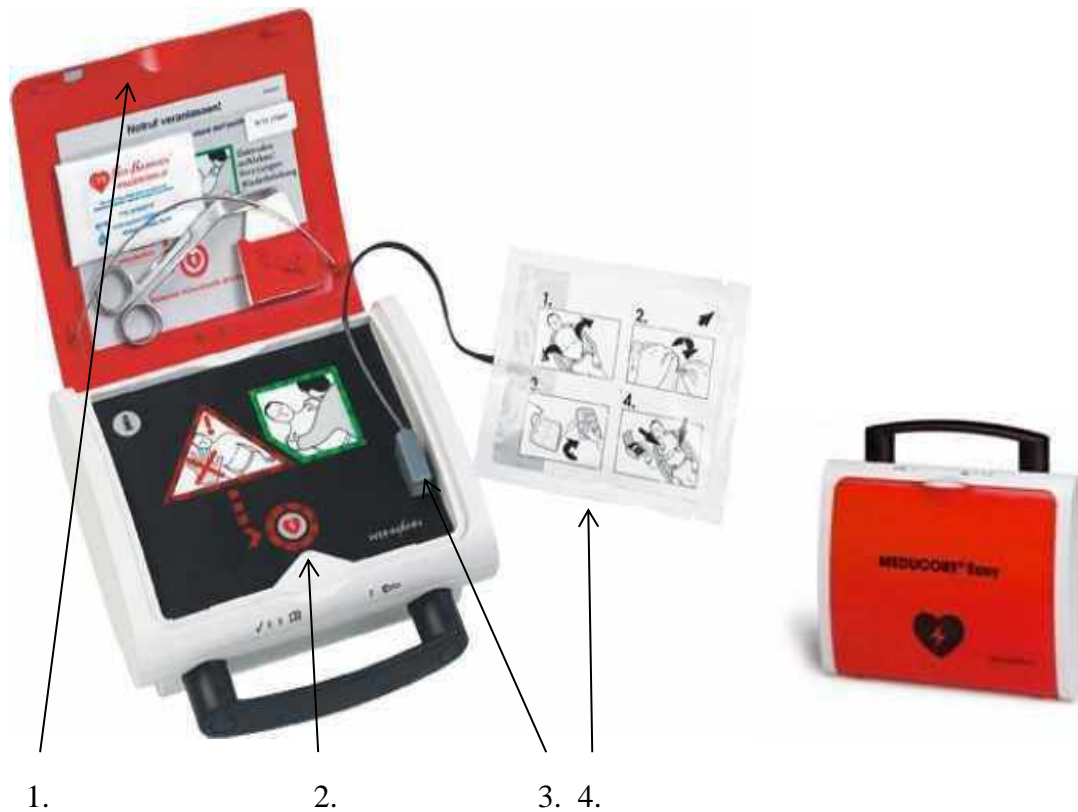

Semi – automatic

Legenda:

1. Otvor veko prístroja, AED sa automaticky zapne
2. Červené tlačidlo na podanie výboja
3. Pripojenie defibrilačných elektród
4. Defibrilačné elektródy

Welch Allyn



Semi - automatic

Legenda:

1. Pripojenie defibrilačných elektród
2. Defibrilačné elektródy
3. Červené tlačidlo na podanie výboja
4. Zelené tlačidlo zapnutie/vypnutie prístroja

Zoll AED Plus




Fully – automatic

Semi - automatic

Legenda:

1. Potiahni veko prístroja
2. Stlačením tlačidla on/off sa prístroj zapne
3. Defibrilačné elektródy
4. Pripojenie defibrilačných elektród
5. Tlačidlo na podanie výboja pre typ semi-automatic

Zoll AED 3

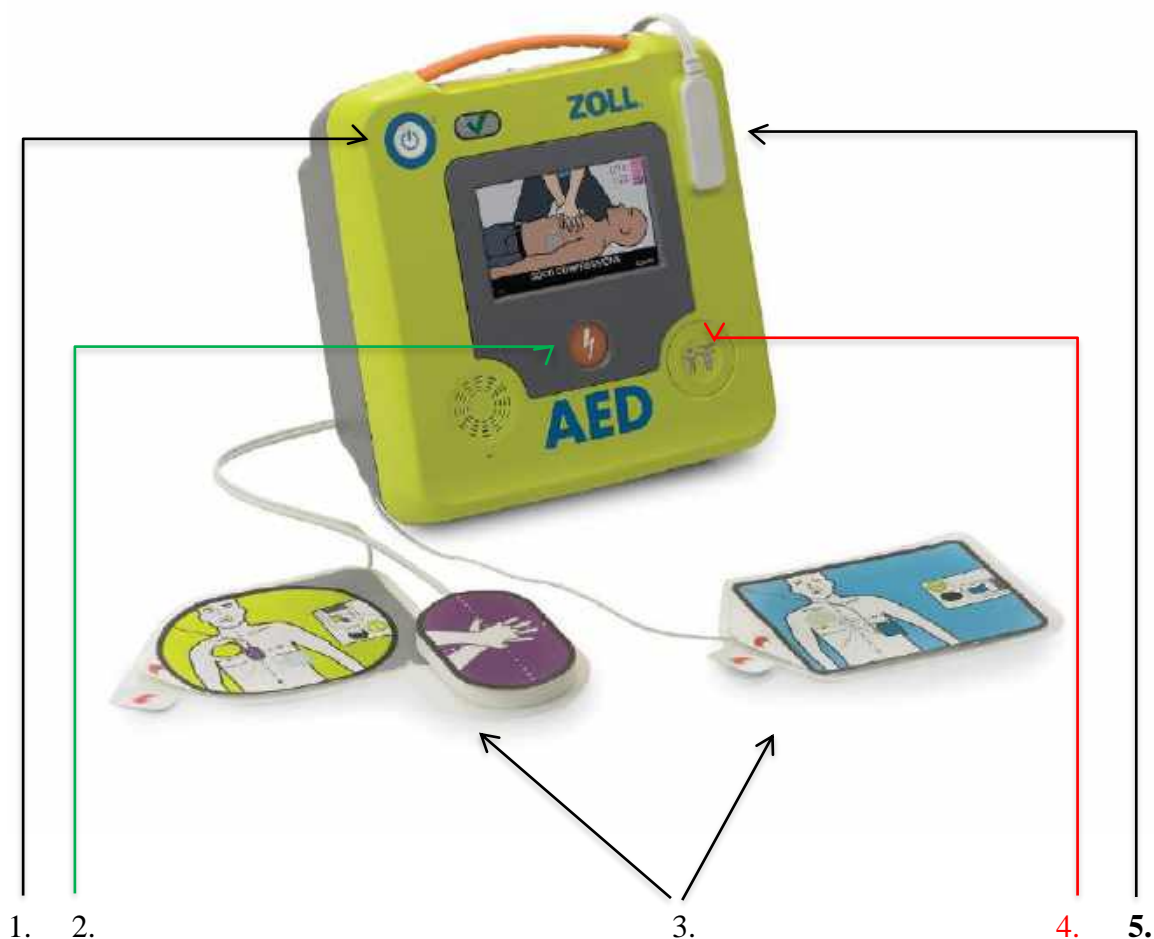

Semi - automatic

Legenda:

1. Stlačením tlačidla on/off sa prístroj zapne
2. Tlačidlo na podanie výboja pre typ semi-automatic
3. Univerzálne defibrilačné elektródy pre dospelých a dieťa, na elektródach znázornené predozadné uloženie pri detskom pacientovi.
4. Tlačidlo detský režim (prístroj má univerzálne elektródy, pre KPR detí prepni na režim dieťa <8r alebo <25kg)
5. Pripojenie defibrilačných elektród

Tlačidlo detský režim



Pediatric mode